



人脸测温仪BS200 使用手册

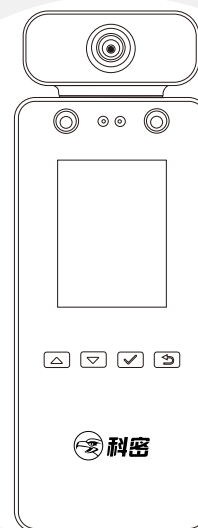

广州博成电子有限公司
售后服务电话:400-9939288



 *本产品测量温度仅用于参考,不能用于医疗诊断标准

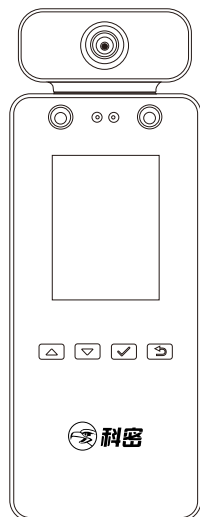

参数

操作系统:RTOS	测量距离:1m
屏幕尺寸:2.8英寸	测量速度:约0.2s
屏幕分辨率:320*240	测量精度:±0.3°C
摄像头:30万像素RGB+IR双摄	测量范围:35~42°C
供电电源:DC 12V1A	测量环境温度:-15~45°C
产品尺寸:200*76*25mm	记录容量:8万条
产品净重:0.3kg	高温抓拍容量:100张

功能设置

按 进入菜单, 、 进行翻页/调节, 为确认, 为返回。

- 1、高温记录查看:上下查看高温抓拍的图像
- 2、测温记录导出:插入U盘后,按确认键,提示“导出成功”即可拔出U盘,正常记录生成成为TXT格式文件,高温图像生成成为文件夹
- 3、音量调节:按确认键调节音量大小
- 4、语音后缀:播报完测温结果后,紧随播报的内容,选择“关闭”可关闭该功能;可选
 - (1)请佩戴好口罩
 - (2)请出示健康码
 - (3)请出示行程码
 - (4)请扫二维码
 - (5)欢迎光临
 - (6)关闭
- 5、°C/°F切换:切换测量单位
- 6、屏保时间:选择时间,该时间内未检测到人员移动则进入屏保画面,检测到人员移动则恢复实时画面
- 7、记录清空:清空所有抓拍图像、测温记录
- 8、时间设置:如时间出现偏差,可进行更正
- 9、高级设置:恢复出厂默认设置、固件更新、温度补偿

声明

未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容会不定期进行更新,恕不另行通知。本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。广州博威电子有限公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失,因遭受外部因素影响造成的产品工作异常、信息泄露。