


远距离测温仪 使用说明书

快速入门指南

1. 三击 "M / °" 键进行防疫播报切换；
2. 短按 "+" 键进入测温历史记录，然后 "+" 键上下翻页查看多组数据；
3. 长按 "-" 两秒后实现 "C/F" 切换，短按 "-" 为手动一键测温功能；
4. 同时按住 "+" "-" 键恢复出厂设置。

本产品仅用于测量体温，不能用于做为医疗诊断的标准。

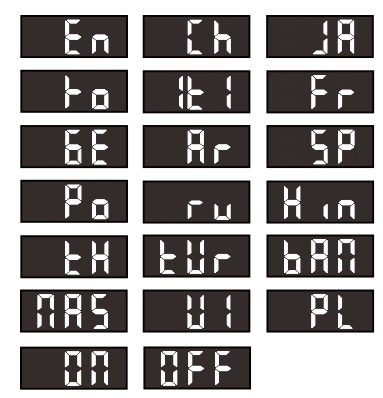

- F9: 防疫播报的选择 (外文状态下无显示)**
- 显示CH1播放声音: "播报1, 体温正常, 播报温度" (默认)
 - 显示CH2播放声音: "播报2, 体温正常"
 - 显示CH3播放声音: "播报3, 体温正常, 请佩戴口罩并打开健康码, 谢谢配合"
 - 显示CH4播放声音: "播报4, 体温正常, 请佩戴口罩, 扫二维码, 谢谢配合"
 - 显示CH5播放声音: "播报5, 体温正常请佩戴好口罩, 谢谢配合"
 - 显示CH6播放声音: "播报6, 体温正常, 欢迎光临"
 - 显示CH7播放声音: "播报7, 体温正常, 请正确佩戴口罩, 扫码乘车, 谢谢配合"

功能确认:
进入设置过程中, 按完F9后可以确认选择的菜单功能。无任何操作8秒也可自动确定选择的菜单功能。期间如果测温则同样可以自动确认选择的菜单功能。

产品使用

1. 电池槽安装3节5号电池供电/一节18650 供电/TTYPE -C 供电 (必须5V电源)
2. 请将设备置于空旷处, 保证被测区域无任何高低温和移动物体; 使用时无需对准, 人体经过即可测量
3. 设备能记忆多组数据, 测温时, 温度数据自动保存下来。+/- 键上下翻页查看数据 (仅适用于人体温度模式)

基本显示介绍

1. 电量偏低: 当电池标 "🔋" 闪烁时 提示电池电量不足; 请及时更换电池, 或者用外部电源供电。
2. 正常温度值: 屏幕显示低于37.4°C的温度值 亮绿灯、播报语音"体温正常"
3. 温度偏高值: 默认设置屏幕显示37.4-42°C的温度值 (可修改) 亮红灯, 播报语音"体温偏高"和警报音
4. 温度过高: 屏幕显示H1的情况下 亮红灯、播报语音"请重新测量"和警报音; 此时高于42°C不测数据
5. 声音关闭: 显示屏上方红灯喇叭灯亮起 声音已经关闭, 可通过调节模式设置中F8选择语音内容。

注意事项

1. 室外使用时请避免阳光直射, 设备不要对着天空、空调口、风扇等;
2. 测温仪正前方20米内有温度过高或者过低物体会自动测量显示高低温;
3. 测温仪正前方有玻璃或镜面反射等会触发折射自动测温;
4. 测温仪远距离检测到风吹草动、树叶飘动等会触发自动测温;
5. 请使用原厂电池或者经过安全认证的电池。

安装方式

本产品可选择安装方式如下:

1. 背后挂钩悬挂
2. 背后双面胶固定
3. 下部三脚架固定

备注: 安装电池前检查电池的正负极。

产品参数

显示屏	高清LED显示
精准确度	±0.2°C
测量时间	0.2秒
异常温度报警	语音报警
测量距离	30-200cm (50cm左右最佳)
供电方式	USB DC 5V 1A/3节5号电池 /1节18650电池
测量环境	-20°C~45°C

模式设置

- 设置方法:**
长按 "°/M" 键5秒为关机功能; 长按 "°/M" 3秒进入设置模式后短按 "°/M" 选择F1-F9菜单, "+" 键选择菜单内选项;
- F1: 测温模式选择 (短暂显示F1)**
选择 [Bod] "默认模式": 测温下限36°C, 温度显示范围 36°C—42°C; 当体表温度低于36°C时播报体温正常, 亮绿灯, 显示 36.0°C;
选择 [Sur] "物温模式": 温度显示范围 0—50°C, 本模式为唯一测量物体温度模式;
- F2: 计数测温模式 (短暂显示F2 Cou):**
OFF为关闭计数模式, 有数字为打开计数测温模式; 默认为关闭状态; 本模式为测温人数和温度数据记录功能, 可随意选择人数; 计数模式下测量温度显示数字后、再显示温度; 达到自己选择的数字后播报"已到齐";
- F3: 高温报警设置 (短暂显示F3)**
按 +/- 键调整报警温度 (默认37.4°C), +/- 键盘选择高低;
- F4: 温度调整设置 (短暂显示F4)**
按 +/- 键调整温度值高低 (默认0°C), +/- 键盘选择大小, 无特殊情况无需设置;
- F5: 音量大小调节 (短暂显示F5)**
+/- 键选择音量大小; 数字越大, 声音越大;
- F6: 前缀声音选择 (短暂显示F6)**
d0 滴声 (默认) d1 叮咚 d2 滴咚 d3 噔咚
- F7: 自动关机功能 (短暂显示F7)**
+/- 键盘选择, OFF为不自动关机, ON为12小时自动关机;
- F8: 多种语言选择 (短暂显示F8)**
语言内容如下: 英语、中文、日语、韩语、意大利语、法语、德语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、印度语、泰语、土耳其语、孟加拉语、马来西亚语、越南语、波兰语、滴滴音、无声。

免责声明

由于产品版本升级或其他原因, 本手册内容会不定期进行更新, 恕不另行通知, 若需要最新版本手册, 请前往官网下载电子手册。本手册仅作为使用指导, 本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。广州博成电子有限公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任, 包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失, 因遭受外部因素造成的产品工作异常、信息泄露。



广州博成电子有限公司
售后服务电话: 400-9939288